

ПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ ОХЛАЖДАЮЩИЙ INVAR KIDS

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛНОСТЬЮ
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ.


Назначение медицинского изделия

Пластырь медицинский охлаждающий INVAR KIDS обеспечивает незамедлительное охлаждающее, успокаивающее действие при головной боли, повышенной температуре тела при простудных заболеваниях, при перегреве тела.

Максимальная температура охлаждения в зоне применения пластыря составляет от 3°C до 7°C от исходной температуры.

Область применения

- Пластырь применяют в качестве охлаждающего компресса в случае повышения температуры тела.
- Можно использовать пластырь для охлаждения разгоряченных участков тела и при ушибах.
- Пластырь предназначен для применения в домашних условиях и/или в лечебных учреждениях.

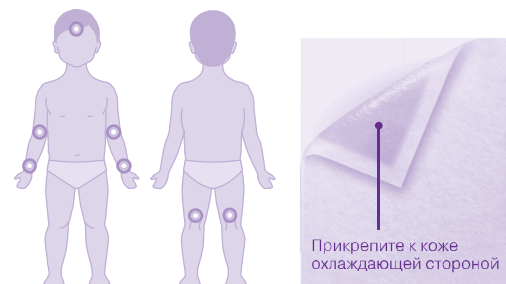

Состав

Нетканый материал (полиэстер 100%), гель (вода q.s., глицерол 14,0%, соль полиакриловой кислоты 6,0%, поливиниловый спирт 4,0%, целлюлозная смола 1,0%, дипропиленгликоль 1,0%, карбомер 0,3%, рацементол 0,06*%, метилпарабен <0,1%, пропилпарабен <0,1%, алюминия глицинат <0,1% полисорбат 80 <0,1%, винная кислота <0,1%, квасцы алюминиевокалиевые <0,01%, краситель С142090** <0,001%), удаляемая пленка (полипропилен 100%),

*0,03% для медицинского изделия вида исполнения Пластырь медицинский охлаждающий INVAR KIDS 5 x 11 см

** только для медицинского изделия вида исполнения Пластырь медицинский охлаждающий INVAR KIDS 5 x 13 см

Инструкция распространяется на виды исполнения, приведенные в Таблице 1.

Таблица 1.1
Комплектация 2 пластыря x 3 саше

Наименование медицинского изделия	Размеры пластыря
Пластырь медицинский охлаждающий INVAR KIDS 5 x 11 см	50 x 110 мм (±3 мм)
Пластырь медицинский охлаждающий INVAR KIDS 5 x 13 см	50 x 130 мм (±3 мм)

Таблица 1.2
Комплектация 2 пластыря x 8 саше

Наименование медицинского изделия	Размеры пластыря
Пластырь медицинский охлаждающий INVAR KIDS 5 x 11 см	50 x 110 мм (±3 мм)
Пластырь медицинский охлаждающий INVAR KIDS 5 x 13 см	50 x 130 мм (±3 мм)

Способ применения

- Во избежание отклеивания наносите на сухую и чистую кожу.
- При необходимости, обрежьте пластырь до нужного размера, в зависимости от участка применения.
- Снимите с пластыря прозрачную пленку и прикрепите к коже охлаждающей стороной.
- Пластырь хорошо крепится, не повреждая кожу.
- Пластыри следует менять каждые 10 часов (охлаждающий эффект может длиться дольше, в зависимости от температуры в области применения; в таком случае замените пластырь, если больше не чувствуете охлаждающего эффекта).
- Клейкая основа пластыря может остаться на сухой коже; смойте ее водой комфортной температуры.

- Для усиления охлаждающего эффекта поместите пластырь в холодильник (при температуре около 5°C; НЕ помещайте пластырь в морозильную камеру); будьте осторожны при повышенной чувствительности к холоду.

Меры предосторожности

- Не использовать при повышенной чувствительности к ментолу или клещим веществам.
- Не наносить на пораженные участки кожи (с открытыми ранами, экземой, сыпью и т.д.), слизистые оболочки и в области глаз.
- Не использовать повторно.
- Не употреблять в пищу.
- Если во время или после использования пластыря на коже появились отеки, сыпь или другие признаки раздражения, немедленно прекратить применение и обратиться к врачу.
- Во избежание случайного проглатывания, прилипания ко рту или к носу, а также попадания в рот, использовать пластыри у детей младшего возраста или лиц с ограниченными физическими возможностями следует под контролем родителей или ответственного лица. Если такие пользователи остаются без присмотра на длительный период времени, следует снять пластырь на это время, а затем наклеить новый, чтобы продолжить применение.

Возможные побочные действия

Во время или после использования пластыря возможно появление на коже отеков, сыпи или других признаков раздражения. В этом случае рекомендуется немедленно прекратить применение и обратиться к врачу.

Противопоказания к применению

Пластырь медицинский охлаждающий INVAR KIDS не предназначен для применения у детей младше 3-х лет.

Условия хранения и срок годности

- Хранить в сухом месте, при температуре не выше 30°C, вдали от воздействия прямых солнечных лучей и источников тепла. Не замораживать!
- Хранить в недоступном для детей месте.
- После вскрытия саше плотно свернуть вскрытую сторону, чтобы защитить пластырь от высыхания; по возможности, использовать пластыри как можно скорее.
- Срок годности 3 года.
- Не использовать Пластыри медицинские охлаждающие INVAR KIDS по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия транспортирования

Медицинские изделия могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке для каждого вида транспорта.

Транспортирование осуществляют в соответствии с условиями хранения Пластыря медицинского охлаждающего INVAR KIDS.

Не бросать и не ронять упаковки медицинского изделия. Обращаться с осторожностью. Не ставить коробку горизонтально.

Утилизация и уничтожение

Использованные части Пластыря медицинского охлаждающего INVAR KIDS подлежат утилизации и уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами, установленными СанПиН 2.1.7.2790-2010 по классу Б и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Неиспользованные Пластыри медицинские охлаждающие INVAR KIDS, не имевшие контакта с биологическими жидкостями пациентов, неиспользованные упаковки медицинского изделия должны быть утилизированы в соответствии с порядком утилизации твердых бытовых отходов, установленным законодательством Российской Федерации по классу А СанПиН 2.1.7.2790-2010.

Масса нетто

Для исполнения 5 x 11 см: 11,7г ±1,5г/пластырь
Для исполнения 5 x 13 см: 13,86г ±1,95г/пластырь

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ:

www.invar.ru

Производитель:
КОНТРАД СВИСС СА, Виа Ферруччио Пелли 2,
6900 Лугано, Швейцария,
CONTRAD SWISS SA, Via Ferruccio Pelli 2, 6900
Lugano, Switzerland.

Место производства:
515, Jobonji-cho, Kashihara-shi,
Nara-ken, 634-0803 Japan.
515, Джобонджи-чо, город Касихара,
префектура Нара, 634-0803 Япония.

**Уполномоченный представитель
на территории РФ: ООО «ИНВАР»**,
115054, Москва, ул. Дубининская, д. 57, стр. 1,
тел.: (495) 544-51-54, 964-15-75
Юридический адрес: 107023, г. Москва,
пл. Журавлева, д. 2, строен. 2.